



PROCEDIMIENTO PRUEBA DE ANTÍGENO RÁPIDO DE COVID-19 (ABBOTT) EN MUESTRA NASOFARÍNGEA

INDICACIONES PARA REALIZAR ESTE TEST:

El test se utilizará únicamente en los casos previstos por el protocolo de vigilancia de Coronavirus del Departamento de Salud.

<https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/covid/Paginas/protocolos.aspx>

Descripción del KIT COVID-19 RAPID TEST DEVICE.

Este kit contiene:

- Hisopos para la recogida de las muestras nasofaríngeas.
- Tubo de extracción.
- Tapón para tapar el tubo de extracción.
- El dispositivo para realizar el test de antígeno rápido de Covid – 19
- La solución que se mezcla con la muestra nasofaríngea.
- Una gradilla
- El control negativo y positivo para comprobar que el test es correcto.
- Instrucciones de uso



PROCEDIMIENTO

La persona encargada de realizar el procedimiento debe vestir un **equipo de protección individual**.



En un primer momento se va a realizar la recogida de la muestra nasofaríngea y posteriormente se realizará la técnica, prueba de antígeno rápido de COVID – 19 en muestra nasofaríngea.


Es necesario llevar un orden, ya que tiene que seguirse la trazabilidad de la muestra obtenida con el volante, el tubo de extracción y el dispositivo de obtención del resultado de la prueba de antígeno rápido de COVID – 19 en muestra nasofaríngea.

Cada vez que se abra un kit COVID – 19 Rapid Test, es necesario realizar el chequeo de los dispositivos utilizando los controles positivos y negativos que vienen en cada kit para ello. (Ver anexo II)


Previo a la recogida de las tomas nasofaríngeas:

- Se colocará la etiqueta grande con el código de barras en el volante de solicitud, que debe quedar fuera de la zona del paciente.
- Las etiquetas restantes se colocaran en el reverso del volante
- Se colocará una pegatina numérica en el tubo donde introduciremos el hisopo tras la recogida de la muestra nasofaríngea.
- Se echará la solución en el tubo de extracción, hasta llegar a la línea de llenado. Esta solución es estable hasta la fecha de caducidad si se mantiene entre 2 – 30 ° C de temperatura.
- Colocar el tubo de extracción con el líquido en la gradilla.

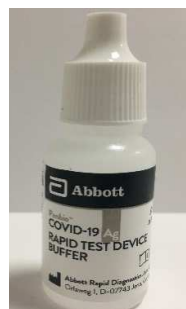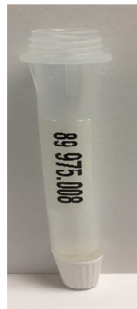

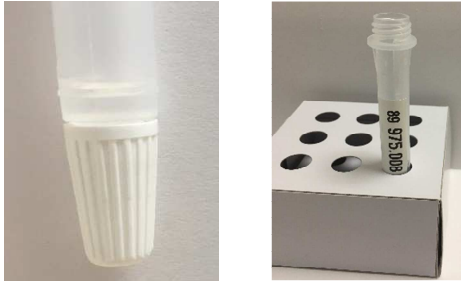**Realizar la recogida de las tomas nasofaríngeas.**

- Se realizan 2 tomas nasofaríngeas, una de cada fosa nasal, con el mismo hisopo.
- El paciente tiene que venir con la mascarilla correctamente colocada cubriendo nariz y boca.
- Indicar al paciente que baje la mascarilla dejando libre la nariz, tapando la boca.
- Inclinar la cabeza del paciente hacia atrás.
- Insertar el hisopo a través de cada fosa nasal.
- Frotar y girar 3 o 4 veces.
- Mantener el hisopo durante 3 o 4 segundos dentro.
- Retirar lentamente el hisopo.
- Indicar al paciente que se coloque correctamente la mascarilla.

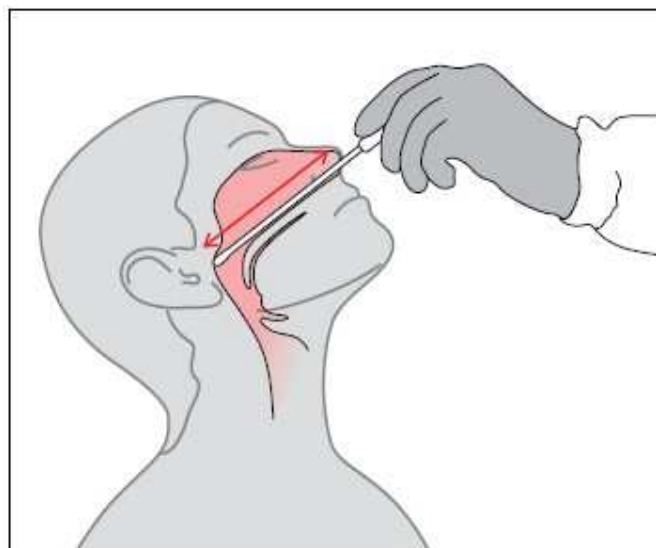**Una vez obtenida la muestra nasofaríngea.**

- Inserte el hisopo en el tubo de extracción.

- Girar el hisopo 5 veces dentro de la solución y rozar a la vez, la pared del tubo de extracción, para que se desprenda la muestra nasofaríngea obtenida.
- Retire el hisopo un centímetro y exprima el hisopo; apretando las paredes de tubo de extracción con los dedos contra el hisopo.
- Volver a introducir el hisopo.
- Romper el palo del hisopo.
- Cerrar el tubo de extracción con el tapón.

Desde que se introduce el hisopo, tenemos 2 horas para realizar el test.



Realización de la prueba

- Abrir un dispositivo para realizar el test.



- Etiquetar el dispositivo, con la pegatina del laboratorio, se debe cerciorar que la etiqueta se corresponda con el volante y el tubo de extracción.



- Abrir la tapa de la boquilla de goteo de la parte inferior del tubo de extracción.




- Dispensar 5 gotas en el dispositivo.
- Cerrar la boquilla del tubo de extracción.
- Dejar en la gradilla, hasta que el resultado se obtenga.
- No manipular ni mover el dispositivo una vez echadas las 5 gotas, hasta que la prueba esté completa.
- Poner en marcha el cronómetro, 15 minutos.




- Realizar la lectura del dispositivo entre los 15 – 20 minutos.
- No realizar la lectura del dispositivo, más tarde de los 20 minutos, el resultado no sirve.
- Una vez obtenido el resultado del dispositivo, eliminar la muestra en el lugar correspondiente.

Los resultados que podemos obtener con la prueba de antígeno rápido de Covid – 19 en muestra nasofaríngea:


Negativo: la presencia de sólo la línea de control C y ningún resultado en la línea de prueba T.

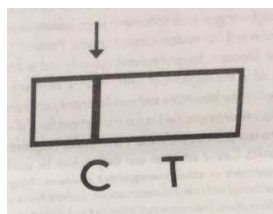

Positivo: la presencia de la línea de prueba T, da igual que esta línea sea muy marcada o débil, siempre que haya presencia de la línea de prueba T y presencia en la línea de control C.

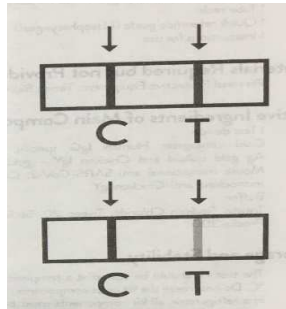

No valorable: Si la línea de control C, no está visible dentro de la ventana de resultados después de realizar la prueba, o ha habido problemas que no permiten obtener un resultado.

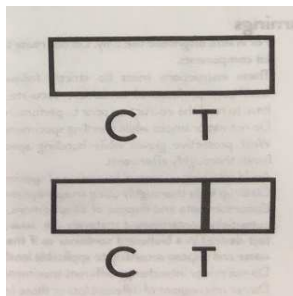

Una vez obtenido el resultado, es necesario APUNTAR el resultado en el volante. Confirmar que se trata de un volante en el que está solicitada la prueba de Ag.

Es **IMPRESINDIBLE** que se introduzca el resultado en los sistemas de información para que le llegue al paciente por SMS y para que se activen las correspondientes acciones epidemiológicas. Para ello, una vez tenemos el resultado, la petición **se concilia de la forma habitual** y en ese momento el programa solicita el resultado. Se elegirá entre las opciones Positivo, Negativo y No valorable.

Los volantes una vez conciliados y al final del turno, se enviarán al laboratorio de Microbiología para su archivo electrónico en sobre aparte, rotulado como "Antígenos"

ANEXO I: INSTRUCCIONES RÁPIDAS DE REALIZACIÓN COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE (NASOPHARYNGEAL).

Panbio[®]
Abbott **COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE**
(NASOPHARYNGEAL)

QUICK REFERENCE GUIDE

REF 41FK10

DE
Kurzanleitung
(NASOPHARYNGEAL)
Technischer Support:
Abbott.com/POCT


ES
Guía de referencia rápida
(NASOFARÍNGEA)
Asistencia técnica:
Abbott.com/POCT

FR
Guide de référence rapide
(Prélèvement Nasopharyngé)
Support Technique ;
Abbott.com/POCT

IT
Guida Rapida di Riferimento
(NASOFARINGEO)
Supporto Tecnico
Abbott.com/POCT

PT
Guia de referência rápida
(NASOFARÍNGEA)
Suporte técnico:
Abbott.com/POCT

RU
Краткое руководство
(назофарингеальный тампон)
Техническая поддержка:
Abbott.com/POCT

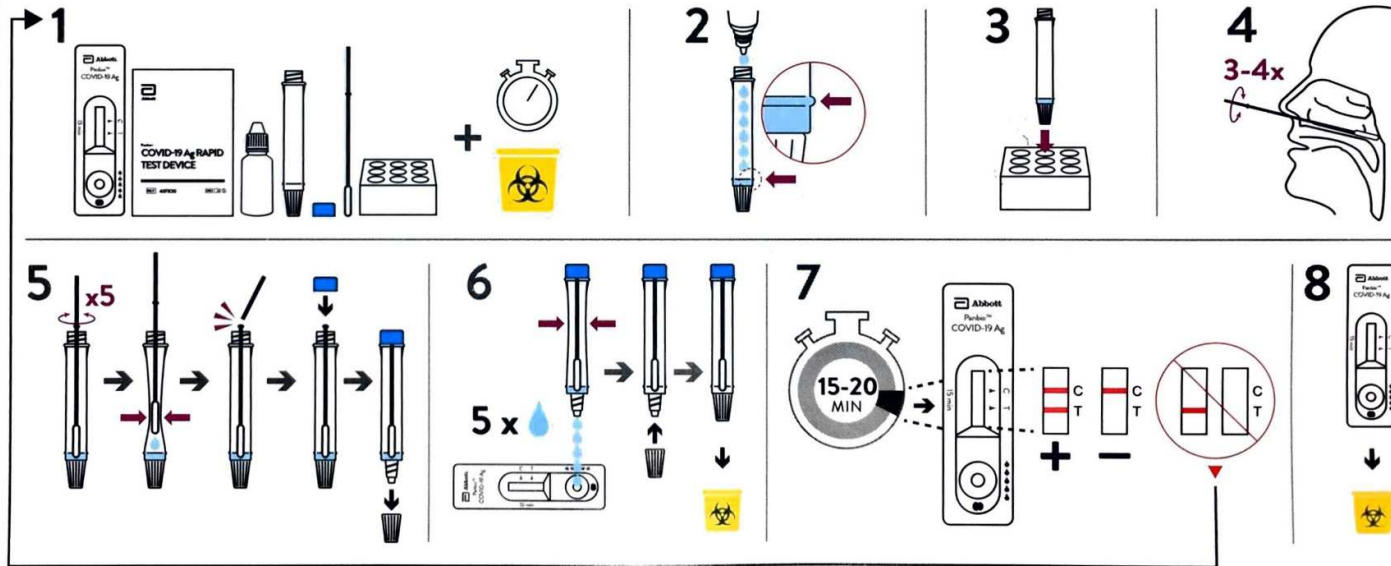

TECHNICAL SUPPORT: ABBOTT.COM/POCT

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

41FK10-07-QRG-A0

ANEXO II. COMPROBACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS CON LOS CONTROLES POSITIVO – NEGATIVO

- Coger dos tubos de extracción.
- Se echará la solución en el tubo de extracción, hasta llegar a la línea de llenado. Esta solución es estable hasta la fecha de caducidad si se mantiene entre 2 – 30 ° C de temperatura.
- Colocar los tubos de extracción con el líquido en la gradilla.
- En uno de ellos colocar el hisopo control negativo y en el otro colocar el hisopo control positivo.
- Girar el hisopo 5 veces dentro de la solución y rozar a la vez con la pared del tubo de extracción, para que se desprenda la muestra nasofaríngea obtenida.
- Retire el hisopo un centímetro y exprima el hisopo; apretando las paredes de tubo de extracción con los dedos contra el hisopo.
- Volver a introducir el hisopo.
- Romper el palo del hisopo.
- Cerrar el tubo de extracción con el tapón.
- Abrir un dispositivo para realizar el test.
- Abrir la tapa de la boquilla de goteo de la parte inferior del tubo de extracción.
- Dispensar 5 gotas en el dispositivo.
- Cerrar la boquilla del tubo de extracción.
- Dejar en la gradilla, hasta que el resultado se obtenga, después desechar en el contenedor adecuado.
- Poner en marcha el cronómetro, 15 minutos. No manipular ni mover el dispositivo una vez echadas las 5 gotas, hasta que la prueba esté completa.
- Realizar la lectura del dispositivo entre los 15 – 20 minutos.
- No realizar la lectura del dispositivo, más tarde de los 20 minutos, el resultado no sirve.
- Una vez obtenido el resultado del dispositivo, eliminar la muestra en el lugar correspondiente.